




Breedfixatie pleister


Mefix® is ideaal voor de fixatie van verbanden, kompressen, katheters en tubes. Het biedt een veilige fixatie en een beschikt over een kleeflaag die niet-agressief is voor de huid.

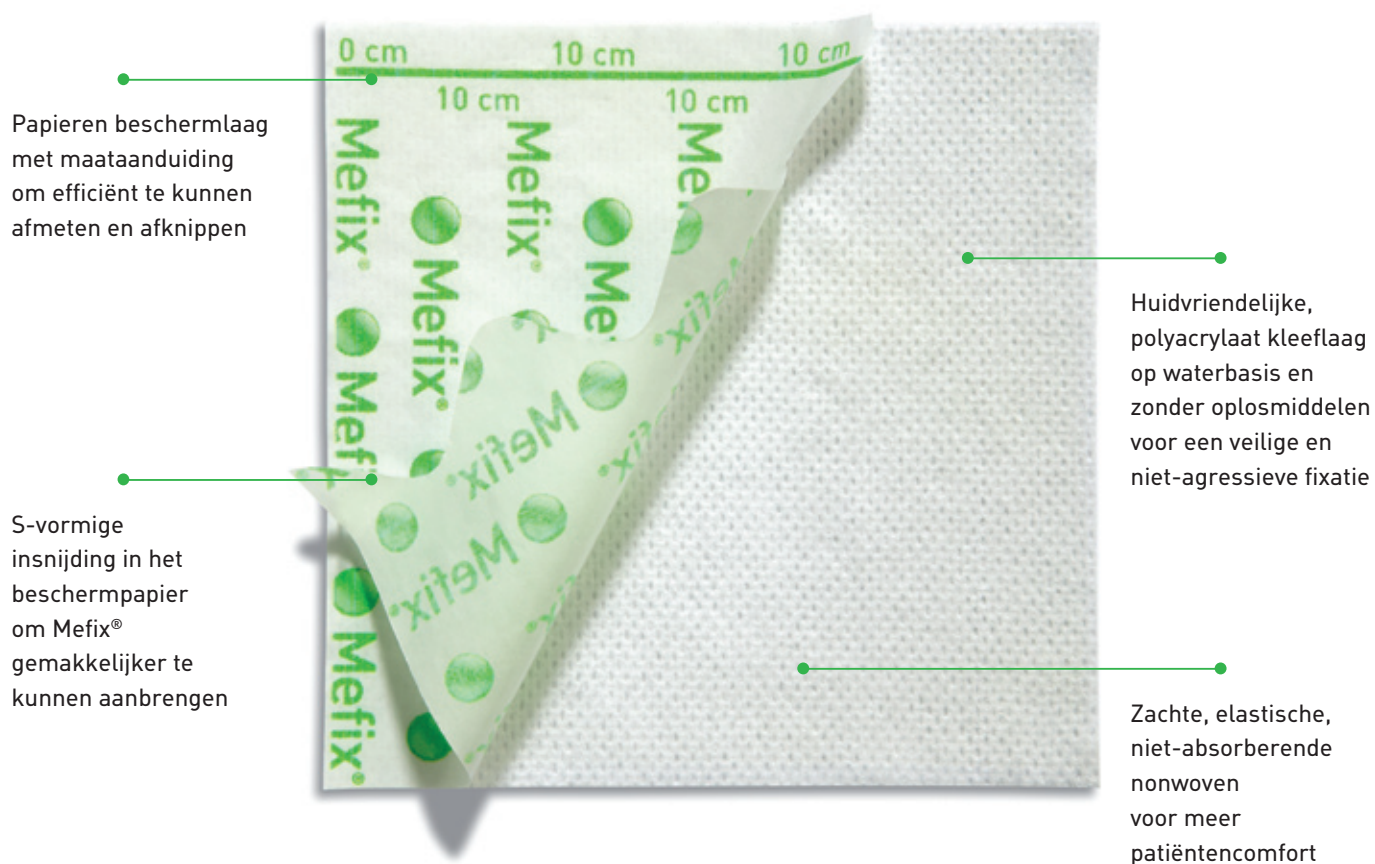

Gebruiksaanwijzing – fixatie door middel van de S-insnijding



Knip Mefix® op de gewenste lengte.

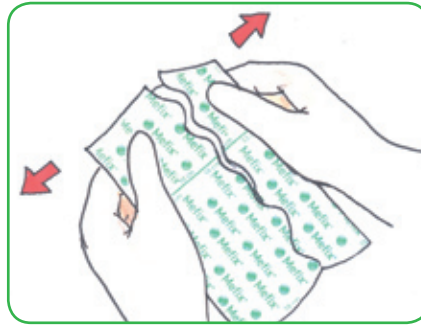

Breek het bescherm papier in twee door Mefix® zachtjes uit te rekken en te buigen. Verwijder het smalste gedeelte van het papier.



Breng het klevende gedeelte aan op de huid. Verwijder vervolgens het andere gedeelte van het bescherm papier. Strijk Mefix® glad zodat de pleister goed kleeft. Vermijd bij het aanbrengen Mefix® uit te rekken.

Hoe werkt Mefix®?

De poreuze structuur van het nonwoven materiaal waarborgt de doorlaatbaarheid van lucht en waterdamp. De pleister is flexibel en vormt zich perfect naar de lichaamscontouren zodat men zich vrij kan bewegen. Het materiaal is eveneens niet-absorberend en vormt een barrière tegen doorsijpelend bloed en wondvocht. De polyacrylaat kleeflaag op waterbasis biedt een veilige fixatie en is tevens niet-agressief voor de huid.

Het bescherm papier is voorzien van maataanduidingen met telkens een interval van 10 cm zodat de pleister gemakkelijk in de gewenste afmeting geknipt kan worden. Dankzij de insnijding (voor rolbreedte > 2,5 cm) is het bescherm papier eenvoudig te verwijderen en aan te brengen.

Voordelen van Mefix®

- Huidvriendelijke kleeflaag op waterbasis en zonder oplosmiddelen
- Bescherm papier met maataanduiding om efficiënt te kunnen afmeten en afknippen
- Vormt zich perfect naar de lichaamscontouren
- Luchtdoorlatend, voorkomt maceratie en zorgt voor meer comfort
- Kan gesteriliseerd worden door middel van stoom en EtO



Toepassingen

Mefix® kan gebruikt worden in de meest uiteenlopende situaties waarin fixatie vereist is, zoals de fixatie van verbanden, kompressen, katheters en buisjes.

Voorzorgsmaatregelen

Breng Mefix® aan in de anatomische houding en zonder tractie om beschadigingen aan de huid te voorkomen. Zeker wanneer Mefix® wordt aangebracht op gewrichten is dit een belangrijk aandachtspunt. .

Assortiment Mefix® (niet-steriel)

Afmeting (breedte)	CNK-code	Art.nr.	Binnenverp.	Transportverp.
<u>10 meter rollen</u>				
2,5 cm	0839-951	310250	1 stuk	39 stuks
5 cm	0839-969	310500	1 stuk	20 stuks
10 cm	0183-137	311000	1 stuk	20 stuks
20 cm	0890-491	312000	1 stuk	10 stuks
30 cm	0137-729	313000	1 stuk	10 stuks
<u>2,5 meter rollen</u>				
5 cm	0614-966	310570	1 stuk	36 stuks
10 cm	0614-974	311070	1 stuk	18 stuks
15 cm	0614-982	311570	1 stuk	12 stuks