

Op maat gemaakte laparoscopieoplossingen



BARRIER® Abdo-perineaal laparoscopiemarken

- All-in-one model met geïntegreerde elementen
 - eenvoudig en efficiënt af te dekken door één persoon
 - tijdbesparend
 - bevordert het aseptisch handelen
- BARRIER® Flex plakstroken voor een betrouwbare barrière bij insufflatie van de buik
- Geïntegreerde zakken en slangenhouders om ordelijk te werken
- Perineale opening met geïntegreerde afdekking
- Met de geïntegreerde plakstrook kan de lengte van de beenhoezen worden aangepast
- 100% ondoordringbare materialen om de veiligheid van de patiënt te garanderen

Instructies



1. Gebruik het zelfklevend afdekdoek als ondersteeklaken wanneer u begint af te dekken.



2. Houd rekening met de richting van het pictogram op het laparoscopiemarkering. Verwijder het releasepapier.



3. Plaats het afdeklaken gecentreerd op de patiënt. Vouw het open, eerst naar u toe en dan van u af.



4. Houd rekening met het pictogram op het voeteinde. Neem de hoek van de beenhoes vast en vouw ze open over het been. Doe hetzelfde voor het andere been.



5. Vouw het laken volledig open in de richting van het hoofd van de patiënt.



7. Plaats de perineale afdekking over het perineum. Gebruik indien gewenst de plakstrook om het uiteinde van het afdeklaken te bevestigen aan de voorzijde van de jas van de ok-assistent of chirurg. Het is ook mogelijk om het afdeklaken aan het laken te bevestigen. Controleer of de BARRIER® Flex plakranden goed bevestigd zijn aan de patiënt en verwijder het crêpepapier.



7. U bent klaar met het afdekken.

Scan de QR-code voor meer informatie over Mölnlycke Health Care of om een instructievideo te bekijken.



Ref.	Componenten ProcedurePak		
944200	Laparoscopiemarkering 250/175/270x260 cm, zelfklevende opening 25x30 cm en opening 13x24 cm		
944210	Laparoscopiemarkering 300/200/270x295 cm, zelfklevende opening 25x30 cm en opening 13x24 cm		
Ref.	Steriele codes	Verpakking	
694240	4 Handdoekjes 18 x 25 cm 1 OP-tape 9x 49 cm 1 Slangenhouders, klittenband 2,5 x 30 cm 1 Zelfklevend afdekdoek 75 x 75 cm 1 Laparoscopiemarkering 250/175/270 x 260 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm en opening 13 x 24 cm 1 Instrumentenveld 150 x190 cm, 75 x190 cm absorberend		5/10
694241	1 Mayo overzettafelsloop 79x145 cm, 65 x 85 cm absorberend 4 Handdoekjes 18 x 25 cm 1 OP-tape 9x 49 cm 1 Slangenhouders, klittenband 2,5 x 30 cm 1 Zelfklevend afdekdoek 75 x 75 cm 1 Laparoscopiemarkering 250/175/270 x 260 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm en opening 13 x 24 cm 1 Instrumentenveld 150 x190 cm, 75 x190 cm absorberend		5/10
694242	1 Mayo overzettafelsloop 79x145 cm, 65 x 85 cm absorberend 4 Handdoekjes 18 x 25 cm 1 OP-tape 9x 49 cm 1 Slangenhouders, klittenband 2,5 x 30 cm 1 Zelfklevend afdekdoek 75 x 75 cm 1 Laparoscopiemarkering 300/200/270 x 295 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm en opening 13 x 24 cm 1 Instrumentenveld 150 x190 cm, 75 x190 cm absorberend		5/10

Alle vermelde componenten kunnen ook opgenomen worden in ProcedurePak® trays.

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
 Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52
 De Mölnlycke Health Care naam en logo en BARRIER® en ProcedurePak® merknamen zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep. © 2016 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden (NLSU00361601)

Mölnlycke®