

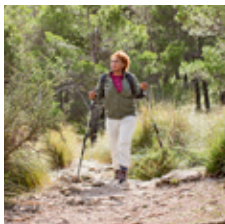


# Assortiment Wondzorg

België: Februari 2020

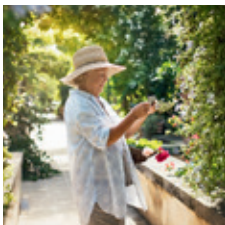

# Het werkingsmechanisme van Safetac® technologie

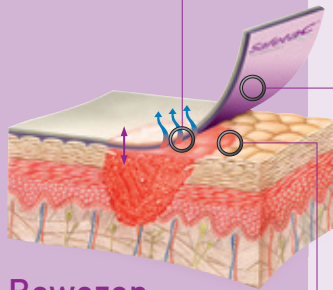

## Bewezen effectiviteit

Ref.1 : White R.Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005; 1 (3): 104-109.

Ref.2 : Waring P. et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011.

Ref.3 : Dykes PJ et al. Removal of a hydrocolloid dressing. Journal of Wound Care 2001; 10: 7-10.

Ref.4 : Wiberg AM et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster publication. World Union of Wound Healing Societies congress, Toronto, Canada, 2008.

Ref.5 : Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Management 2003.

Ref.6: White R.A. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.


## Minder weefseltrauma bij verwijdering



- ▷ Hecht zich zacht aan de droge omliggende huid<sup>1,2</sup>
- ▷ Bescherm het nieuw gevormde weefsel in het wondbed
- ▷ Geen stripping van huidcellen



## ▷ Huidcellen blijven intact<sup>3</sup>:

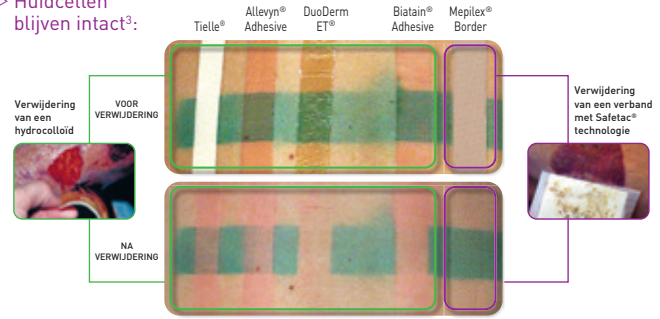

## Minder pijn bij verwijdering




- ▷ Een soepele Safetac® adhesielaag
- ▷ Vormt zich naar de huidporiën<sup>3</sup>
- ▷ Zachte en selectieve adhesie



## ▷ Tweemaal minder pijn

Pijnscore bij verwijdering geëvalueerd door de patiënt  
0 = geen pijn  
10 = ondraaglijke pijn

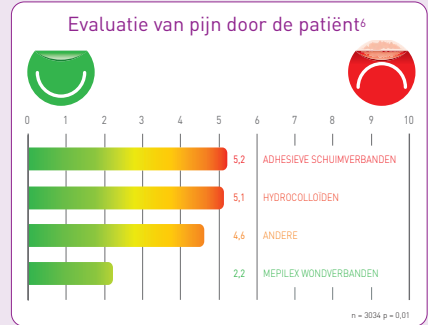

## Geen maceratie



- ▷ Optimaal exsudaatmanagement door verticale vochtopname
- ▷ Geen maceratie door goede aansluiting aan de wondranden<sup>4,5</sup>
- ▷ Behoudt een vochtig wondmilieu



Polyurethaan film met traditionele kleeflaag









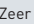
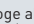
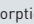
Polyurethaan film met Safetac® adhesielaag


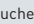

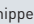

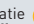
## Situatie na aanbrengen inkt op perforatie

- ▷ De inkt sijpelt onder de film
- ▷ Laterale lekkage
- ▷ Risico op maceratie van de omliggende huid
- ▷ De inkt blijft binnen de perforatie
- ▷ Barrière-effect
- ▷ De omliggende huid blijft gezond en droog

# Oppervlakkige wonden




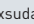



		Tissue		Infection		Edge		
		Necrose: Debrideren	Fibrine: Reinigen	Granulatie: Beschermen	Epithelialisatie: Beschermen	Roodheid, warmte, pijn, zwelling		
Moisture (Vocht)	Droog	Hydrogel + Zelfklevend schuimverband Mepilex <sup>®</sup> Border Flex			Wondcontactlaag of film Mepitel <sup>®</sup> One of Mepitel <sup>®</sup> Film		Gebruik verbanden met  om het risico op - maceratie - pijn & trauma - huidstripping - blaarvorming en - allergische reacties te minimaliseren	
	Vochtig	Schuimverband Mepilex <sup>®</sup> XT	&	Fixatie Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRETCH <sup>®</sup>	Zilver-schuim- verband & Fixatie Mepilex <sup>®</sup> Ag & Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRETCH <sup>®</sup>		Zelfklevend zilver-schuimverband Mepilex <sup>®</sup> Border Ag	
	Nat	Reinigend verband Mesalt <sup>®</sup> + Schuimverband Mepilex <sup>®</sup> XT & Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRETCH <sup>®</sup> of + Zelfklevend schuimverband Mepilex <sup>®</sup> Border Flex	Gelvormend vezelverband Exufiber <sup>®</sup> + Schuimverband & Fixatie Mepilex <sup>®</sup> XT & Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRETCH <sup>®</sup> of Gelvormend vezelverband Exufiber <sup>®</sup> + Zelfklevend schuimverband Mepilex <sup>®</sup> Border Flex			Alginaat -of Vezelverband met zilver Melgisorb <sup>®</sup> Ag / Exufiber <sup>®</sup> Ag- + Zelfklevend schuimverband Mepilex <sup>®</sup> Border Flex		
	Zeer nat	Gelvormend vezelverband Exufiber <sup>®</sup> + Superabsorberend verband & Fixatie Mextra <sup>®</sup> & Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRETCH <sup>®</sup>			Alginaat -of Vezelverband met zilver Melgisorb <sup>®</sup> Ag / Exufiber <sup>®</sup> Ag- + Superabsorberend verband & Fixatie Mextra <sup>®</sup> & Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRETCH <sup>®</sup>			

Legende     Exsudaat-niveau  Zeer hoge absorptie van exsudaat  Antimicrobiële barrière  Antimicrobieel verband

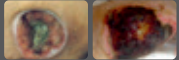 Douche-bestendig  Knippen kan  Fixatie nodig  Secundair verband nodig  Fixatie optioneel  Secundair verband optioneel

# Diepe wonden

Moisture (Vocht)

	Tissue		Infection	Edge	
	<b>Necrose: Debrideren</b> 	<b>Fibrine: Reinigen</b> 	<b>Granulatie: Beschermen</b> 	<b>Epithelialisatie: Beschermen</b> 	<b>Roodheid, warmte, pijn, zwelling</b> 
Droog	Hydrogel	+ Vochtig kompres Fixatie Mepitel <sup>®</sup> Film	Wondcontactlaag of film Mepitel <sup>®</sup> One of Mepitel <sup>®</sup> Film	Hydrogel + Alginaat -of Vezelverband met zilver Melgisorb <sup>®</sup> Ag / Exufiber <sup>®</sup> Ag+ + Zelfklevend schuimverband Mepilex <sup>®</sup> Border Flex	Gebruik verbanden met 
Vochtig	Alginaat Melgisorb <sup>®</sup> Plus + Schuimverband Mepilex <sup>®</sup> XT & Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRETCH <sup>®</sup> of + Zelfklevend schuimverband Mepilex <sup>®</sup> Border Flex	Gelvormend vezelverband Exufiber <sup>®</sup> + Schuimverband & Fixatie Mepilex <sup>®</sup> XT & Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRETCH <sup>®</sup> of	Alginaat -of Vezelverband met zilver Melgisorb <sup>®</sup> Ag / Exufiber <sup>®</sup> Ag+ + Schuimverband & Fixatie Mepilex <sup>®</sup> XT & Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRETCH <sup>®</sup> of Zelfklevend schuimverband Mepilex <sup>®</sup> Border Flex	om het risico op - maceratie - pijn & trauma - huidstripping - blaarvorming en - allergische reacties te minimaliseren	
Nat	Reinigend verband Mesalt <sup>®</sup> + Schuimverband Mepilex <sup>®</sup> XT & Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRETCH <sup>®</sup> of + Zelfklevend schuimverband Mepilex <sup>®</sup> Border Flex	Gelvormend vezelverband Exufiber <sup>®</sup> + Zelfklevend schuimverband Mepilex <sup>®</sup> Border Flex	Alginaat -of Vezelverband met zilver Melgisorb <sup>®</sup> Ag / Exufiber <sup>®</sup> Ag+ + Zelfklevend schuimverband Mepilex <sup>®</sup> Border Flex	Verzorg de droge wondomgeving met Epaderm Crème 	
Zeer nat		Gelvormend vezelverband Exufiber <sup>®</sup> + Superabsorberend verband & Fixatie Mextra <sup>®</sup> & Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRETCH <sup>®</sup>	Alginaat -of Vezelverband met zilver Melgisorb <sup>®</sup> Ag / Exufiber <sup>®</sup> Ag+ + Superabsorberend verband & Fixatie Mextra <sup>®</sup> & Tubifast <sup>®</sup> 2-WAY STRETCH <sup>®</sup>		





**ZELFKLEVENDE  
SCHUIMVERBANDEN**

**Mepilex® Border Flex**



Zelfklevend, absorberend,  
flexibel schuimverband

Acute letsels zoals snij- en schaafwonden.  
Postoperatieve wonden.  
Voor anatomisch moeilijker lichaamsdelen  
bv gewrichten, plooibare plaatsen



Verpakkingen (steriel)			
7,8 x 10	5	4155-719	583500
13 x 16	5	4155-727	583300
15 x 19	5	4155-743	583400

**NIEUW**  
**NIEUW**  
**NIEUW**

**Mepilex® Border Flex**



Zelfklevend, absorberend,  
flexibel schuimverband



**RECHTHOEKIG**

Voor  
exsuderende  
acute en  
chronische  
wonden in alle  
stadia van de  
wondheling



Verpakkingen (steriel)			
7,5 x 7,5	5	3699-477	595200
10 x 10	5	3699-485	595300
15 x 15	5	3699-493	595400
15 x 20	5	3699-501	595600

**Mepilex® Border**



Zelfklevend, absorberend  
schuimverband

Preventie en behandeling  
van doorligwonden



Verpakkingen (steriel)			
7,5 x 7,5	5	2339-703	295200
10 x 10	5	2339-729	295300
15 x 15	5	2339-745	295400
15 x 20	5	2339-760	295600
10 x 20	5	2594-406	295800
10 x 25	5	2777-274	295850
10 x 30	5	2594-422	295900

**Mepilex® Border Lite**



Dun, zelfklevend,  
absorberend schuimverband

Acute letsels zoals schaaf- en snijwonden.  
Topletsels.



Verpakkingen (steriel)			
4 x 5	10	2256-592	281000
5 x 12,5	5	2256-626	281100
7,5 x 7,5	5	2256-634	281200
10 x 10	5	2256-667	281300
15 x 15	5	2256-683	281500

**ZELFKLEVENDE  
SCHUIMVERBANDEN**

**Mepilex® Border Sacrum**



Zelfklevend, absorberend  
schuimverband voor sacrum



Preventie en  
behandeling  
van doorlig-  
wonden  
sacrum



Verpakkingen (steriel)			
16 x 20	5	3586-963	282050
22 x 25	5	3586-971	282450

**Mepilex® Border Heel**



Zelfklevend, absorberend  
schuimverband voor de hiel



Preventie en  
behandeling  
van doorlig-  
wonden  
hiel



Verpakkingen (steriel)			
22 x 23	6	3590-114	282750

**Mepilex® Border Post-Op**



Zelfklevend,  
absorberend verband

Postoperatieve wonden



Verpakkingen (steriel)			
6 x 8	10	n.v.t.	496100
9 x 10	10	n.v.t.	496200
10 x 15	10	n.v.t.	496300
10 x 20	10	n.v.t.	496400
10 x 25	10	n.v.t.	496450
10 x 30	10	n.v.t.	496600
<b>NIEUW</b> 10 x 35	5	n.v.t.	496650
10 x 20	5	3633-377	496405
10 x 25	5	3633-385	496455
10 x 30	5	3633-393	496605

**SCHUIMVERBANDEN**

**Mepilex® XT**



Schuimverband met  
exsudaatvoerkanalen

Voor exsuderende acute en  
chronische wonden in alle stadia  
van de wondheling, zoals been-  
en voetulcera, doorligwonden  
en traumatische wonden.



Verpakkingen (steriel)			
5 x 5	5	3465-333	211015
10 x 10	5	3319-217	211100
10 x 20	5	3319-225	211200
15 x 15	5	3319-233	211300
20 x 20	5	3319-241	211400
20 x 50	2	3465-325	211500



**Mepilex®** SafetaC  
TECHNOLOGY

Been- en voetulcera.  
Oppervlakkige  
2degraadsbrandwonden.



Afmetingen (cm) Stuks/ doos CNK-code verpakking Artikel-nummer

**Verpakkingen (steriel)**

5 x 5	5	2973-725	294015
10 x 10	5	1446-780	294100
12,5 x 12,5	5	2442-994	294000
12,5 x 12,5	16	2443-026	294050
10 x 20	5	1446-806	294200
15 x 15	5	1446-822	294300
20 x 20	5	1446-848	294400
20 x 50	2	2602-860	294500

**Mepilex® Lite** SafetaC  
TECHNOLOGY

Diabetes voet. Oncologische  
en bestralingswonden.



Dun, absorberend schuimverband

**Verpakkingen (steriel)**

6 x 8,5	5	2115-236	284000
10 x 10	5	2115-251	284100
15 x 15	5	2115-277	284300
20 x 50	4	3028-677	284500

**Mepilex® Transfer** SafetaC  
TECHNOLOGY

Droge tot zeer vochtige oncologische of  
bestralingswonden. Epidermolysis Bullosa.



Wondvochtdoorlatend  
schuimverband

**Verpakkingen (steriel)**

15 x 20	5	1747-401	294800
20 x 50	4	3003-332	294502

**Mepilex® Heel** SafetaC  
TECHNOLOGY

Doortligwonden hiel.



Absorberend schuimverband  
voor de hiel

**Verpakkingen (steriel)**

13 x 20	5	2315-570	288100
15 x 22	5	2678-373	288300

**WONDCONTACTLAGEN****Mepitel® One** SafetaC  
TECHNOLOGY

Skin tears, topletsels,  
andere acute wonden.  
Negatieve druktherapie.



Afmetingen (cm) Stuks/ doos CNK-code verpakking Artikel-nummer

Wondcontactlaag met  
enkelzijdige adhesie

**Verpakkingen (steriel)**

5 x 7,5	10	2678-399	289100
7,5 x 10	10	2678-415	289300
10 x 18	10	2678-449	289500
6 x 7	5	3958-543	289170
9 x 10	5	3958-550	289270
13 x 15	5	3958-568	289470
17 x 25	5	2678-464	289700

**NIEUW**  
**NIEUW**

**Mepitel®** SafetaC  
TECHNOLOGY

Skin tears en andere  
acute wonden.  
Epidermolysis Bullosa.  
Negatieve druktherapie.



Wondcontactlaag met dubbelzijdige adhesie

**Verpakkingen (steriel)**


5 x 7,5	10	1183-185	290510
7,5 x 10	10	1183-193	290700
10 x 18	10	1183-201	291010
20 x 30	5	1183-219	292005

**Verpakkingen per 2 stuks (steriel)**

5 x 7,5	2	1599-620	290580
---------	---	----------	--------

**VEZELVERBANDEN & ALGINATEN****Exufiber®**

Zowel diepe als oppervlakkige doortligwonden,  
beenulcera, diabetische  
voetulcera en caviteiten.

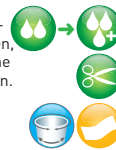

Sterk absorberend,  
gelvormend vezelverband

**Verpakkingen (steriel)**

5 x 5	10	3984-572	709900
10 x 10	10	3984-580	709901
15 x 15	10	3984-598	709903
20 x 30	5	3984-606	709904
2 x 45	5	3984-622	709909
4,5 x 20	10	3984-614	709906

**Melgisorb® Plus**

Vochtige tot zeer vochtige  
doortligwonden, beenulcera  
en postoperatieve wonden.



Zeer absorberend, hemostatisch algiinaatverband

**Verpakkingen (steriel)**

5 x 5	10	3057-502	252000
10 x 10	10	3057-510	252200
10 x 20	10	3057-528	252500
3 x 45 [streng]	5	3057-551	253500



**Mesalt®**Wonden met  
vervloeiende necrose.

Reinigend verband



Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
5 x 5	30	1457-332	285580
7,5 x 7,5	30	1457-340	285780
10 x 10	30	1457-357	286080
2cmx1m (streng)	10	1599-638	285280

**Verpakkingen (steriel)****FIXATIE****Mepitel® Film** SafetaC TECHNOLOGY

Huidbescherming, fixatie van verbanden, behandeling en preventie van oppervlakkige huidletsels, behandeling van brandwonden en preventie van huidreacties bij radiotherapie.

Zelfklevend, transparant,  
ademend filmverband

Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
6 x 7	10	2941-284	296100
10 x 12	10	2941-250	296200
10 x 25	10	2941-268	296400
15 x 20	10	2941-276	296600

**Verpakkingen (steriel)****Mepitac®** SafetaC TECHNOLOGYFixatie van drains, buisjes,  
sondes, elektroden.

Fixatietape

Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
2 cm x 3 m	1	2205-433	298300
4 cm x 1,50 m	1	2205-474	298400

**Verpakkingen (niet steriel)****LITTEKENVERBAND****Mepiform®** SafetaC TECHNOLOGYHypertrofische littekens,  
keloiden en gesloten wonden.

Littekenverband

Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
4 x 30	5	1457-266	293100
5 x 7,5	5	1457-274	293200
10 x 18	5	1457-282	293400

**Verpakkingen (steriel)****ZELFKLEVENDE SCHUIM-  
VERBANDEN MET ZILVER**

Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
-----------------	-------------	---------------------	---------------

**Mepilex® Border Ag** SafetaC TECHNOLOGYZelfklevend absorberend  
schuimverband met zilverDoortligwonden. Postoperatieve wonden.  
MITS deze wonden tekenen van infectie  
vertonen, of ter preventie ervan.

Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
12,5 x 12,5	5	2696-565	395010
17,5 x 17,5	5	2696-581	395410
10 x 20	5	2696-615	395800
10 x 25	5	2777-282	395700
10 x 30	5	2696-631	395900

**Verpakkingen (steriel)****Mepilex® Border Sacrum Ag** SafetaC TECHNOLOGYZelfklevend absorberend schuimverband  
met zilver voor het sacrumDoortligwonden sacrum.  
MITS deze wonden tekenen van infectie  
vertonen, of ter preventie ervan.

Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
18 x 18	5	2696-656	382000
23 x 23	5	2696-672	382400

**Verpakkingen (steriel)****SCHUIMVERBANDEN MET ZILVER****Mepilex® Ag** SafetaC TECHNOLOGY

Absorberend schuimverband met zilver

Been- en voetulcera. Oppervlakkige 2degraadsbrandwonden.  
MITS deze wonden tekenen van infectie vertonen,  
of ter preventie ervan.

Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
6 x 8,5	5	2441-962	287021
12,5 x 12,5	5	2440-899	287121
10 x 21	5	2440-907	287221
17,5 x 17,5	5	2440-915	287321
20 x 50	2	2602-852	287510

**Verpakkingen (steriel)****Mepilex® Heel Ag** SafetaC TECHNOLOGYAbsorberend schuimverband  
voor de hiel met zilverDoortligwonden hiel. MITS deze wonden tekenen  
van infectie vertonen, of ter preventie ervan.

Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
13 x 20	5	2709-038	388100
15 x 22	5	2777-290	388300

**Verpakkingen (steriel)**

**VEZEL - EN ALGINAAT-  
VERBAND MET ZILVER****Exufiber® Ag+**

Middelmatig tot sterk exsuderende veneuze beenulcera en diabetes voetulcera mits tekenen van infectie.



Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
-----------------	-------------	---------------------	---------------

Gelvormend vezelverband met zilver

**Verpakkingen (steriel)**

5 x 5	10	3984-523	603401
10 x 10	10	3984-531	603402
15 x 15	10	3984-549	603403
20 x 30	5	3984-564	603407
2 x 45 (streng)	5	3984-515	603400
4,5 x 20 (streng)	10	3984-556	603405

**Melgisorb® Ag**

Vochtige tot zeer vochtige doorligwonden, beenulcera en postoperatieve wonden. MITS met tekenen van infectie.



Antimicrobieel, hemostatisch alginaatverband met zilver

**Verpakkingen (steriel)**

5 x 5	10	2602-621	256055
10 x 10	10	2602-639	256105
15 x 15	10	2602-647	256155
3 x 44 (streng)	10	2602-654	256605

**HUIDVERZORGING****Epaderm®  
crème**

Vrij van parabenen, geen geur- en kleuradditieven



Een verzachtende crème voor eczeem, psoriasis en droge huidaandoeningen. Basisbehandeling voor mild tot matig aangetaste huidzones.

**• Bevat slechts 6 bestanddelen**

- Gele zachte paraffine
- Vloeibare paraffine
- Emulgerende was
- Gezuiverd water
- Chlorocresol
- Glycerine

Inhoud	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
50 g	12	2733-350	99400823
500 g	6	2733-723	99400824

**EILANDPLEISTERS****Mepore® Pro**

Postoperatieve wonden en acute letsels.



Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
-----------------	-------------	---------------------	---------------

Zelfklevende, absorberende, nonwoven wondpleister

**Verpakkingen (steriel)**

6 x 7	10	2382-190	680840
9 x 10	10	2382-208	680940
9 x 15	10	2382-216	681040
9 x 20	10	2382-224	681140
6 x 7	60	1619-782	670820
9 x 10	40	2308-526	670920
9 x 15	40	2308-534	671020
9 x 20	30	1619-840	671120
9 x 25	30	1619-865	671220
9 x 30	30	1619-881	671320

**Mepore®**

Postoperatieve wonden en acute letsels.



Zelfklevende, absorberende, nonwoven wondpleister

**Verpakkingen (steriel)**

6 x 7	10	0615-351	670870
9 x 10	5	0190-942	670970
9 x 15	5	0190-959	671070
6 x 7	60	1599-646	670800
9 x 10	50	1599-653	670900
9 x 15	50	1599-661	671000
9 x 20	30	1599-679	671100
9 x 25	30	1599-687	671200
9 x 30	30	1599-810	671300
9 x 35	30	1599-844	671400

**Verpakkingen (niet steriel)**

2 m x 7 cm (rol)	1	0615-005	332080
------------------	---	----------	--------

**Mepore® Film & Pad**

Postoperatieve wonden en acute letsels.



Ademend, transparant, zelfklevend filmverband met kompres

**Verpakkingen (steriel)**

4 x 5	5	2509-537	275110
5 x 7 ovaal	5	2509-545	275210
5 x 7	5	2509-552	275310
9 x 10	5	2509-560	275410
9 x 15	5	2509-578	275510
9 x 20	5	2509-586	275610
4 x 5	85	2539-120	275100
5 x 7 ovaal	85	2539-138	275200
5 x 7	85	2539-146	275300
9 x 10	30	2539-153	275400
9 x 15	30	2539-161	275500
9 x 20	30	2539-187	275600
9 x 25	30	2539-195	275700
9 x 30	25	2539-211	275800
9 x 35	25	2539-229	275900

## FILMVERBANDEN

### Mepore® Film

Huidbescherming, fixatie van wondverbanden, primair/secundair verband voor schone wonden in granulatiefase.



Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
6 x 7	10	2440-865	270670
10 x 12	10	2440-873	271570
10 x 25	10	2440-881	272570
15 x 20	10	2440-857	273000
6 x 7	100	2440-808	270600
10 x 12	70	2440-824	271500
10 x 25	20	2440-840	272500

Ademend, transparant, zelfklevend filmverband

#### Verpakkingen (steriel)

### Mepore® IV

Fixatie van intraveneuze en andere intravasculaire katheters.



Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
5,5 x 5	100	2398-824	274000
8 x 9	70	2398-832	274200
10 x 11	70	2398-840	274400

Zelfklevend, ademend IV-filmverband

#### Verpakkingen (steriel)

## FIXATIEVERBANDEN

### Mefix®

Secundaire fixatie van verbanden, gaaskompressen, katheters en buisjes.



Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
2,5 m x 5 cm	1	0614-966	310570
2,5 m x 10 cm	1	0614-974	311070
2,5 m x 15 cm	1	0614-982	311570
10 m x 2,5 cm	1	0839-951	310250
10 m x 5 cm	1	0839-969	310500
10 m x 10 cm	1	0183-137	311000
10 m x 15 cm	1	0890-483	311500
10 m x 20 cm	1	0890-491	312000
10 m x 30 cm	1	0137-729	313000

Nonwoven fixatiepleister

#### Verpakkingen (niet steriel)

## Tubi

WITH 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY

De ideale fixatie voor Mepitel® verbanden



Elastisch buisverband dat zowel in de breedte als in de lengte meerekt.

Indicatief



Art. nr.	CNK-code/ stuk	B x L (cm x m)	Omtrek lichaamsdeel	Doos (stuks)	Transportverpakking (stuks)
<b>ROOD GAMMA</b> 2480	2380-285	3,5 x 1	9 - 18 cm	12	36
<b>ROOD GAMMA</b> 2434	0628-180	3,5 x 10	9 - 18 cm	1	20
<b>GROEN GAMMA</b> 2481	2380-293	5 x 1	14 - 24 cm	12	36
<b>GROEN GAMMA</b> 2436	0628-198	5 x 10	14 - 24 cm	1	24
<b>BLAUW GAMMA</b> 2482	2380-301	7,5 x 1	24 - 40 cm	12	36
<b>BLAUW GAMMA</b> 2438	0628-206	7,5 x 10	24 - 40 cm	1	30
<b>GEEL GAMMA</b> 2483	2380-319	10,75 x 1	35 - 64 cm	12	36
<b>GEEL GAMMA</b> 2440	0628-214	10,75 x 10	35 - 64 cm	1	12
<b>PAARS GAMMA</b> 2479	2380-277	20 x 1	64 - 130 cm	12	48
<b>PAARS GAMMA</b> 2444	2380-269	20 x 10	64 - 130 cm	1	15

## STERK ABSORBERENDE VERBANDEN

Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
-----------------	-------------	---------------------	---------------

### Mextra® Superabsorbent

Niet verklevend, steriel, meerlaags superabsorberend verband

Matig tot sterk exsuderende wonden.

Secundair verband voor Mepitel®, Mepitel® One.

#### Verpakkingen (steriel)



10 x 10	10	3586-559	610700
10 x 15	10	3586-567	610710
10 x 20	10	3586-575	610720
15 x 20	10	3586-583	610730
20 x 25	10	3586-591	610740
20 x 30	10	3586-609	610750
20 x 40	10	3586-617	610760

### Mesorb®

Zacht, sterk absorberend, ademend, niet verklevend, nonwoven verband

Direct gebruik op zeer vochtige wonden.

Secundair verband voor Mepitel®, Mepitel® One.

#### Verpakkingen (steriel)



10 x 13	50	2490-498	677001
13 x 15	50	2490-514	677201
10 x 23	50	2490-522	677401
15 x 23	50	2490-530	677601
23 x 25	30	2490-555	677701
23 x 30	30	2490-563	677801

## KOMPRESSEN EN DEPPERS

### Mesoft®

Absorptie, reiniging, bescherming, desinfectie, tamponnage.



Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
-----------------	-------------	---------------------	---------------

Nonwoven kompressen en deppers

#### Kompressen (niet steriel) (40 gr/m<sup>2</sup> - 4 lagen)

5 x 5	100	1337-674	156015
7,5 x 7,5	100	1337-682	156115
10 x 10	100	1337-708	156315
10 x 20	100	1337-724	156415
5 x 5	300	2398-923	156000
7,5 x 7,5	300	2460-020	156100
10 x 10	200	2460-038	156300
10 x 20	200	2460-046	156400

#### Kompressen (niet steriel) (30 gr/m<sup>2</sup> - 4 lagen)

5 x 5	100	1641-265	157000
7,5 x 7,5	100	1641-273	157100
10 x 10	100	1641-299	157300
10 x 20	100	1642-487	157400

#### Kompressen (steriel) (per 2 of per 5 stuks) (40 gr/m<sup>2</sup> - 4 lagen)

5 x 5	75 x 2	2336-675	156040
5 x 5	30 x 5	2336-683	156065
7,5 x 7,5	75 x 2	2336-691	156140
7,5 x 7,5	30 x 5	2336-717	156165
10 x 10	75 x 2	2336-725	156340
10 x 10	30 x 5	2336-733	156365
10 x 20	60 x 2	2336-741	156440
10 x 20	24 x 5	2336-758	156465

#### Splitkompres (steriel) (40 gr/m<sup>2</sup> - 4 lagen)

10 x 10	130 x 1	2336-667	155030
---------	---------	----------	--------

#### Ronde deppers (niet steriel) (40 gr/m<sup>2</sup>)

(S) Ø 2,8	100	2342-327	156700
(M) Ø 3,9	100	1337-807	156800
(L) Ø 4,5	100	1337-815	156900

#### Ronde deppers (steriel) (per 5 stuks) (40 gr/m<sup>2</sup>)

(S) Ø 2,8	20 x 5	2336-766	156760
(M) Ø 3,9	20 x 5	2336-774	156860
(L) Ø 4,5	14 x 5	2336-782	156960



### Gauze™

Absorptie, reiniging, bescherming, desinfectie, tamponnage.



Afmetingen (cm)	Stuks/ doos	CNK-code verpakking	Artikelnummer
-----------------	-------------	---------------------	---------------

Katoenen kompressen en deppers

#### Kompressen (niet steriel)

7 x 10 (8 lagen)	150	2583-128	152400
5 x 5 (8 lagen)	150	2380-871	153100
5 x 5 (12 lagen)	120	2583-565	153000
7,5 x 7,5 (8 lagen)	150	2380-889	153300
7,5 x 7,5 (12 L.)	120	2380-905	153700
10 x 10 (8 lagen)	120	2380-897	153600
10 x 10 (12 lagen)	100	2380-913	158400
10 x 20 (12 lagen)	50	2380-921	158500

#### Kompressen (steriel) (per 2 of per 5 stuks)

5 x 5 (8 lagen)	75 x 2	2380-947	152040
5 x 5 (8 lagen)	30 x 5	2380-939	153165
7 x 10 (8 L.)	75 x 2	2583-540	152440
7 x 10 (8 L.)	30 x 5	1641-695	152465
5 x 5 (12 L.)	24 x 5	1641-711	153065
7,5 x 7,5 (8 L.)	75 x 2	2380-962	153340
7,5 x 7,5 (8 L.)	30 x 5	2380-954	153365
10 x 10 (12 L.)	24 x 5	2380-988	158465
10 x 20 (12 L.)	20 x 5	2380-970	158560
10 x 10 (8 L.)	75 x 2	2252-906	158040
10 x 10 (8 L.)	30 x 5	2252-914	153665

#### Ronde deppers (niet steriel)

Ø 3 (nr. 3)	250	1642-198	150800
Ø 4,5 (nr. 4)	100	1642-214	151300
Ø 5,5 (nr. 5)	100	1642-230	151400

#### Ronde deppers (steriel) (per 5 stuks)

Ø 3 (nr. 3)	30 x 5	2381-002	150860
Ø 4,5 (nr. 4)	24 x 5	2381-010	151360



# Onze oplossingen voor skin tears

Type-indeling volgens ISTAP classificatie systeem (Leblanc et al)

Bron: Best practice recommendations for the prevention and management of skin tears in aged skin, 2018.

Bij volledige of gedeeltelijke aanwezigheid van de vitale huidflap is snel reageren noodzakelijk:


1. Stop een bloeding door constante druk uit te oefenen op de wond. Bij een zware bloeding kunt u een verband met een hemostatische werking gebruiken.
2. Indien nodig: reinig grondig en ontsmet de wond
3. Plaats de huidflap zo snel mogelijk terug
4. Fixeer met Mepitel One

## TYPE 1: Skin tears zonder weefselverlies




- Gebruik een pincet en reconstrueer de huidflap
- Gebruik Mepitel One als fixatie
- Mepitel One kan tot 14 dagen ter plaatse blijven. Laat minimum 5 dagen ter plaatse zodat de huidflap zich aan onderliggend weefsel kan hechten.
- Spoel of reinig de wond tussendoor niet

## TYPE 2: Skin tears met gedeeltelijk weefselverlies

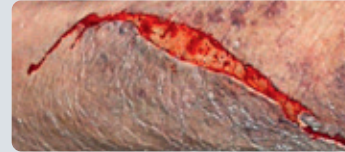

- Gebruik een pincet en reconstrueer de huidflap
- Gebruik Mepitel One of Mepilex Border Flex als fixatie
- Mepitel One kan tot 14 dagen ter plaatse blijven. Laat minimum 5 dagen ter plaatse zodat de huidflap zich aan onderliggend weefsel kan hechten.
- Spoel of reinig de wond tussendoor niet

## TYPE 3: Skin tears met volledig weefselverlies

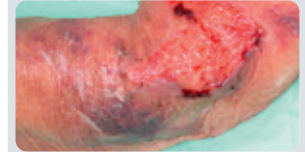

- Eerste dagen na trauma:
  - Meestal veel wondexsudaat
  - Vervang Mepilex Border Flex alleen bij verzadiging
- Door groot weefselverlies kan herstel langer duren

WEINIG EXSUDAAT

VEEL EXSUDAAT

WEINIG EXSUDAAT

VEEL EXSUDAAT

### FASE 1:

Huidflap nog niet aangehecht en/of open wond

Mepitel<sup>®</sup> One

Mepilex<sup>®</sup> Border Flex

Mepitel<sup>®</sup> One

Mesoft<sup>®</sup> Mesorb<sup>®</sup>

+ fixatie

Mepitel<sup>®</sup> One

Mesoft<sup>®</sup> Mesorb<sup>®</sup>

+ fixatie

Mepilex<sup>®</sup> Border Flex

### FASE 2:

Huidflap is aangehecht/ met genezen(de) open wond

### FASE 3:

Wond is genezen

Epaderm<sup>®</sup>  
*Crème*

In geval van INFECTIE

Mepilex<sup>®</sup> Ag \*

Mepilex<sup>®</sup> Border Ag


\* Fixatie met **Tubi**

# Onze oplossingen voor diabetische ulcera

## Antimicrobiële behandeling nodig (infectie)\*




**Diepte**

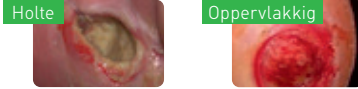


Moisture (Vocht)	<p>Doorg </p> <p>Mepitel® One (+ fixatie nodig)</p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Vochtig </p> <p>Melgisorb® Ag + Mepilex® Border Flex</p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Nat </p> <p>Exufiber® Ag+ + Mepilex® Border Flex</p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Zeer nat </p> <p>Exufiber® Ag+ + Mextra® Superabsorbent (+ fixatie nodig)</p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Antimicrobiële behandeling niet nodig

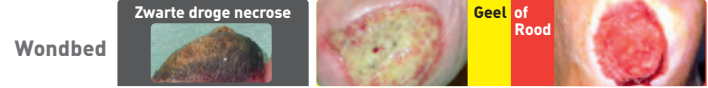

**Diepte**

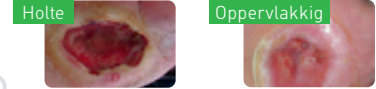

Moisture (Vocht)	<p>Doorg </p> <p>Mepitel® One (+ fixatie nodig)</p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Vochtig </p> <p>Exufiber®** + Mepilex® Border Flex</p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Nat </p> <p>Exufiber® + Mepilex® Border Flex</p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Zeer nat </p> <p>Exufiber® + Mextra® Superabsorbent (+ fixatie nodig)</p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



\*Voor geïnfecteerde DFU's (zie foto) worden over het algemeen debridement, lokale antiseptica en systemische antibiotica aanbevolen. Actieve infecties moeten dringend worden doorverwezen naar een MDT. Actuele antimicrobiële stoffen, bijvoorbeeld in reinigingsmiddelen of verband, kunnen in combinatie met antibiotica worden gebruikt om milde infecties te behandelen. Dergelijke verbandmiddelen of reinigingsmiddelen kunnen ook alleen worden gebruikt voor de behandeling van DFU's die een groot risico op het ontwikkelen van infecties lopen.

\*\* Alleen Exufiber gebruiken bij voldoende exsudaat.

# Onze oplossingen voor veneus ulcus cruris



## EVALUATIE:

1. Evalueer en diagnoseer het type ulcus; evalueer de conditie van de huid.
2. Bepaal de behandeldoelen.
3. Bereid het wondbed en de omgevende huid voor. Overweeg eventueel een debridement van niet-levensvatbaar weefsel.
4. Reinig wond en volledig been.  
Indien geen infectie: reinigen en droogdeppen.  
In geval van infectie: reinigen en ontsmetten.

## VEEL EXSUDAAT



## MATIG EXSUDAAT



## WEINIG EXSUDAAT



## VERBETER DE HUIDCONDITIE:

Hydrateren en verzachten van de huid

Epaderm®  
crème

Epaderm Crème



## EXSUDAATMANAGEMENT:

verbandkeuze

Indien cavitaire of diepe wonde

Exufiber®



Mextra® Superabsorbent

Exufiber®

Under compressieverbanden

Mepilex® XT

Under compressiekousen

Mepilex® Border Flex

Under compressieverbanden

Mepilex® Lite

Under compressiekousen

Mepilex® Border Lite

Mepilex



## In geval van INFECTIE

**BELANGRIJK:**  
Het verband elke dag wisselen

Indien cavitaire of diepe wonde

Melgisorb® Ag/  
Exufiber® Ag+



Mextra® Superabsorbent

Under compressieverbanden

Mepilex® Ag

Under compressiekousen

Mepilex® Border Ag

Under compressieverbanden

Mepilex® Ag

Under compressiekousen

Mepilex® Border Ag

Mepilex Ag



## FIXATIE

Gebruik een dubbele lengte Tubifast  
- 1ste lengte: om het verband ter plaatse te houden en de huid te beschermen  
- 2de lengte: na compressietherapie 2de lengte terugvouwen om verbanden ter plaatse te houden (niet knippen in de dubbele lengte)

Tubi

® 2-WAY STRETCH®  
WITH TECHNOLOGY

Tubifast 2Way Stretch



## COMPRESSIETHERAPIE

**Compressietherapie** moet geïnitieerd en aangebracht worden door een **professionele zorgverlener** voor een **optimale behandeling** van het veneus ulcus cruris.

Compressie mag enkel toegepast worden bij veneuze been ulcera. Bij enig vermoeden van arteriële of gemengde etiologie is het beter de compressie uit te stellen tot de arteriële insufficiëntie is uitgesloten.

Compressietherapie



# Onze oplossingen voor de behandeling van decubitus

## CATEGORIE I:

Niet-wegdrukbaar roodheid



Intacte huid met niet wegdrubbare roodheid op een duidelijk gelokaliseerde plaats, meestal boven een beenderig uitsteeksel.

Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum

Mepilex<sup>®</sup> Border Heel

Mepilex<sup>®</sup> Border

## CATEGORIE II:

Oppervlakkige aantasting



Gedeeltelijk verlies van de epidermis of dermis dat gekenmerkt is als een ondiep open ulcus met een rozerood wondbed zonder beslag, een intacte blaas of een opengescheurde blaas gevuld met sereus of bloederig vocht.

Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum

Mepilex<sup>®</sup> Border Heel

Mepilex<sup>®</sup> Border

In geval van matig tot veel exsudaat

Exufiber<sup>®</sup>



Mepilex<sup>®</sup> Border

**In geval van INFECTIE**

Voor de volledige beschrijving van de categorieën van decubitus zie EPUAP<sup>1</sup>

## CATEGORIE III:

Volledig weefselverlies



Subcutaan vetweefsel kan zichtbaar zijn, maar botten, pezen of spierweefsel liggen niet bloot. Ondermijning of fistelvorming kan voorkomen.

Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum

Mepilex<sup>®</sup> Border Heel

Mepilex<sup>®</sup> Border

In geval van matig tot veel exsudaat

Exufiber<sup>®</sup>



Mepilex<sup>®</sup> Border

Mepilex<sup>®</sup> Ag \*

Mepilex<sup>®</sup> Heel Ag \*



Mepilex<sup>®</sup> Border Ag



Melgisorb<sup>®</sup> Ag

## CATEGORIE IV:

Verlies van onderhuids weefsel



Volledig verlies van cutis en subcutis waarbij botten, pezen of spieren blootliggen. Ondermijning of fistelvorming kan voorkomen.

Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum

Mepilex<sup>®</sup> Border Heel

Mepilex<sup>®</sup> Border

In geval van matig tot veel exsudaat

Exufiber<sup>®</sup>



Mepilex<sup>®</sup> Border

 Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum Ag

<sup>1</sup>EPUAP: European Pressure Ulcer Advisory Panel

\* Fixatie met Tu i

# Onze oplossingen voor brandwonden

<b>Oppervlakkige brandwonden</b> 	<b>Tweede graads brandwonden</b> 	<b>Derde graads brandwonden</b> 		<b>Donor sites</b> 	<b>Skin grafts</b> 	<b>Genezen brandwonden</b> 
Pijn ontlasten Verzachten Kalmeren Hydrateren	<b>Verzorging thuis</b> Voorzien van verbanden met langere draagtijd Voorzien van gemakkelijke verwijderbare verbanden	<b>Verzorging ziekenhuis</b> Regelmatig evalueren Chirurgisch debrideren	Wondoppervlakte voorbereiden voor transplantaat Regelmatig evalueren Infecties voorkomen Regelmatig evalueren Chirurgisch debrideren	Lange draagtijd voorzien Absorberen Pijn ontlasten	Fixeren van het transplantaat Beschermen van het transplantaat	Jeuk verminderen Bevochtigen Beschermen van de fragiele huid Voorkomen van littekens
<b>Epiderm</b> <i>Crème</i>	<b>Mepilex XT*</b>	<b>Graft</b> + Mepitel One + Mesorb* ☼ Mextra Superabsorbent*		<b>Mepilex XT*</b>	<b>Graft</b> + Mepilex XT*	<b>Mepiform</b>
<b>Mepitel Film</b>		<b>Graft</b> + Mepitel One + Mesorb* ☼ Mextra Superabsorbent*	<b>Graft</b> + Mepilex XT*	<b>Mepitel One</b> + Mesorb* ☼ Mextra Superabsorbent*	<b>Graft</b> + Mepitel One + Mesorb* ☼ Mextra Superabsorbent*	<b>Epiderm</b> <i>Crème</i>
<b>In geval van INFECTIE</b>				<b>Mepilex Ag*</b>		

\* Fixatie met **Tubi**





# Knip- en applicatietips

BNWC00012002

**SafetaC**  
TECHNOLOGY



[www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)  
Mölnlycke Health Care NV  
Berchemstationstraat 72 bus 2  
2600 Berchem (Antwerpen)  
Tel: +32(0)3 286 89 50

Mölnlycke Health Care, SafetaC®, Mepitex®, Mepitel®, Mepitac®, Mepiform®, Mepore®, Mefix®, Mesorb®, Mextra® Superabsorbent, Gauze®, Mesoft®, Melgisorb®, Exufiber®, Epaderm® Crème, Mesalt® en Tubifast® 2-Way Stretch® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke Health Care.  
© Copyright (2020) Mölnlycke Health Care.

  
**Mölnlycke**®














## Hoofd

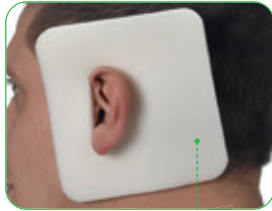

**Mepilex<sup>®</sup> XT** SafetaC  
10 x 10 cm

**Mepilex<sup>®</sup> Ag** SafetaC  
12,5 x 12,5 cm


**Tubi**  
SafetaC  
TECHNOLOGY



Kleurcode geel



**Mepilex<sup>®</sup> Border Lite** SafetaC  
5 x 12,5 cm

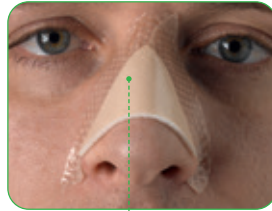

**Mepilex<sup>®</sup> Border Lite** SafetaC  
7,5 x 7,5 cm



**Mepilex<sup>®</sup> Border Lite** SafetaC  
4 x 5 cm

## Fixatie - Bescherming

### Mepitel<sup>®</sup> Film SafetaC<sup>®</sup> TECHNOLOGY

Een huidbeschermend filmverband

Met SafetaC<sup>®</sup> technologie voor minder pijnlijke verbandswissels.


#### • Indicaties

- Als fixatie van primaire verbanden
- Als secundaire fixatie van IV catheters
- Als steriel eindverband
- Als Landing Zone
- In combinatie met gels en zalven



#### • Preventie van huidreacties bij radiotherapie<sup>1</sup>

- voorkomt **vochtige desquamatie** bij borstkankerpatiënten die worden behandeld met radiotherapie
- vermindert de ernst van huidreacties met **92%** in vergelijking met crèmes op waterbasis
- heeft een verwaarloosbaar boluseffect (<0.1mm)

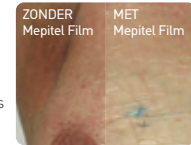

#### • Veilig

- Geen risico op beschadiging van nieuw gevormd weefsel
- Transparant voor een goede wondinspectie
- Barrière tegen bacteriën en virussen

#### • Patiëntcomfort

- Minimaliseert pijn en trauma bij verbandswissels
- Vormt zich naar lichaamscontouren

#### • Praktisch

- Laat geen residu achter
- Ondoordringbaar voor vloeistoffen
- Douchebestendig
- Flexibel

Enkele fixatiesuggesties



1. Herst Ptries M. et al. Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiation-induced moist desquamation in an intra-patient randomised controlled clinical trial of 78 breast cancer patients. Radiotherapy and Oncology 2014.


# Fixatie - Bescherming

## Tubifast® WITH 2-WAY STRETCH® TECHNOLOGY



**Dé ideale fixatie voor Mepilex® verbanden:**  
Elastisch buisverband dat zowel in de breedte als in de lengte meerekt.

- **Zeker**
  - Houdt wondverband stevig op zijn plaats
  - Latexvrij
- **Comfortabel**
  - Gelijkmatig verdeelde druk zonder te knellen
  - Volledige bewegingsvrijheid voor de patiënt
- **Praktisch**
  - Snel en eenvoudig aan te brengen
  - Knip- en wasbaar

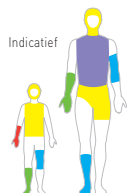

Verkrijgbaar in verschillende kleurcodes in functie van omtrek lichaamsdeel.

	Art. nr.	CNK-code/ stuk	B x L (cm x m)	Omtrek lichaamsdeel	Doos (stuk(s))	Transport- verpakking (stuk(s))
<b>ROOD</b>	2480	2380-285	3,5 x 1	9 - 18 cm	12	36
<b>GAMMA</b>	2434	0628-180	3,5 x 10	9 - 18 cm	1	20
<b>GROEN</b>	2481	2380-293	5 x 1	14 - 24 cm	12	36
<b>GAMMA</b>	2436	0628-198	5 x 10	14 - 24 cm	1	24
<b>BLAUW</b>	2482	2380-301	7,5 x 1	24 - 40 cm	12	36
<b>GAMMA</b>	2438	0628-206	7,5 x 10	24 - 40 cm	1	30
<b>GEEL</b>	2483	2380-319	10,75 x 1	35 - 64 cm	12	36
<b>GAMMA</b>	2440	0628-214	10,75 x 10	35 - 64 cm	1	12
<b>PAARS</b>	2479	2380-277	20 x 1	64 - 130 cm	12	48
<b>GAMMA</b>	2444	2380-269	20 x 10	64 - 130 cm	1	15

Tubifast® 2-Way Stretch® wordt voor ziekenhuizen exclusief verdeeld door H. Nootens N.V. - Tel: +32 (0)2 216 78 63 - E-mail: info@nootens.com



### Kleurcode geel



#### Geplaatst op het hoofd



### Kleurcode paars




#### Geplaatst op de romp



### Kleurcode groen




#### Geplaatst op de hand

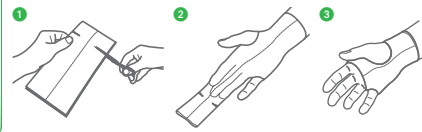

### Kleurcode geel



#### Geplaatst op de heup

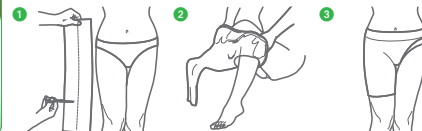

### Kleurcode blauw



#### Geplaatst op het been

