


## Hoe het verband Mepilex Border Flex werkt

Mepilex Border Flex is een alles-in-één schuimverband opgebouwd uit vijf lagen dat heel efficiënt absorbeert en daarbij het wondvocht inclusief bacteriën vasthoudt.<sup>12</sup> De unieke Flex Technologie zorgt voor een aantoonbaar flexibeler verband dan vergelijkbare schuimverbanden met borders.<sup>17</sup> Het past zich aan de bewegingen van het lichaam aan en voelt comfortabel.<sup>2-3</sup> De Safetac® wondcontactlaag zorgt er samen met de Flex Technologie voor dat het verband langer blijft zitten dan andere schuimverbanden\*<sup>1-3</sup> terwijl pijn en trauma ook verminderen.<sup>15-16</sup>. Geschikt voor verschillende soorten wonden.

\*op knieën en ellebogen

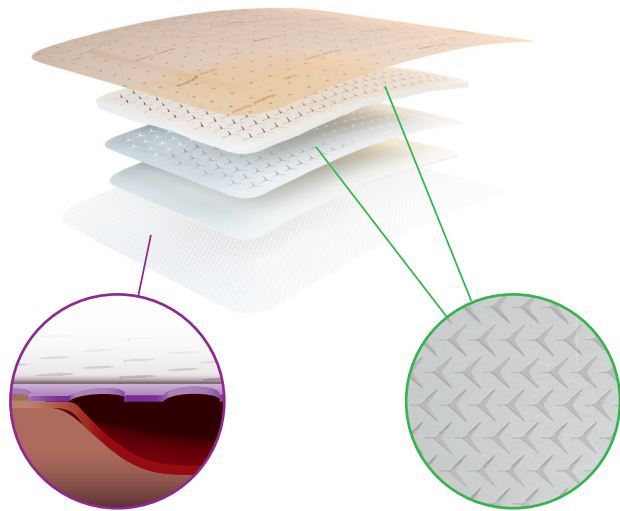

Safetac® wondcontactlaag

Flex technologie

## Voorzorgsmaatregelen

- In geval van tekenen van klinische infectie, raadpleeg een zorgverlener voor een zorgvuldige infectieverzorging.
- Niet gebruiken bij gevoeligheid voor het verband of een van de bestanddelen ervan.
- Bij vragen of enige bezorgdheden, gelieve contact op te nemen met uw zorgverlener. Zie contactgegevens hieronder.

## Contactgegevens zorgverlener




## Referenties

Referenties: 1. Alten. Comparison of Mepilex Border Flex dressing and Mepilex Border dressing in wet condition. Rapport nr. PD-530246. 18 januari 2017. Informatie beschikbaar. 2. ProDerm. Assessment of wearing properties of wound dressings on the knees. Rapport nr. PD-535012. 22 augustus 2016. Informatie beschikbaar. 3. ProDerm. Assessment of wearing properties of wound dressings on the elbows. Rapport nr. PD-535013. 22 augustus 2016. Informatie beschikbaar. 4. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Fluid handling capacity. Rapport nr. PD-527642. Informatie beschikbaar. 5. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Estimation of spreading area using dot pattern on backing film. Rapport nr. PD-528872. Informatie beschikbaar. 6. Nelson Laboratories (Salt Lake City, UT, VS). Viral penetration ASTM Methods F 1671. Rapport nr. 322509. Informatie beschikbaar. 7. Mölnlycke Health Care. Wet penetration. Rapport nr. 2002-0423-001. Informatie beschikbaar. 8. Mölnlycke Health Care. Tests of Mepilex Lite laminate. Rapport nr. 20071123-004. Informatie beschikbaar. 9. Nelson Laboratories (Salt Lake City, UT, VS). Viral penetration ASTM Methods F 1671. Rapport nr. 413098. Informatie beschikbaar. 10. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Waterproofness. Rapport nr. PD-532095. Informatie beschikbaar. 11. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Rapport nr. PD-528871. Informatie beschikbaar. 12. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Bacteria encapsulation. Rapport nr. PD-537072. Informatie beschikbaar. 13. Gebruiksaanwijzing Mepilex Border Flex. Informatie beschikbaar. 14. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 15. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing 2 foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 16. Meaume, S., Van De Looverbosch, D., Heyman, H., Romanelli, M., Ciagherotti, A., Charpin, S. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003;49(9):44-52. 17. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Conformability. Rapport nr. PD-528870. Informatie beschikbaar.



Mölnlycke Health Care NV, Berchemstationstraat 72 bus 2 •  
B-2600 Berchem • Tel. 03 286 89 50. [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke®, Mepilex® en Safetac® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.  
BNWC00021804

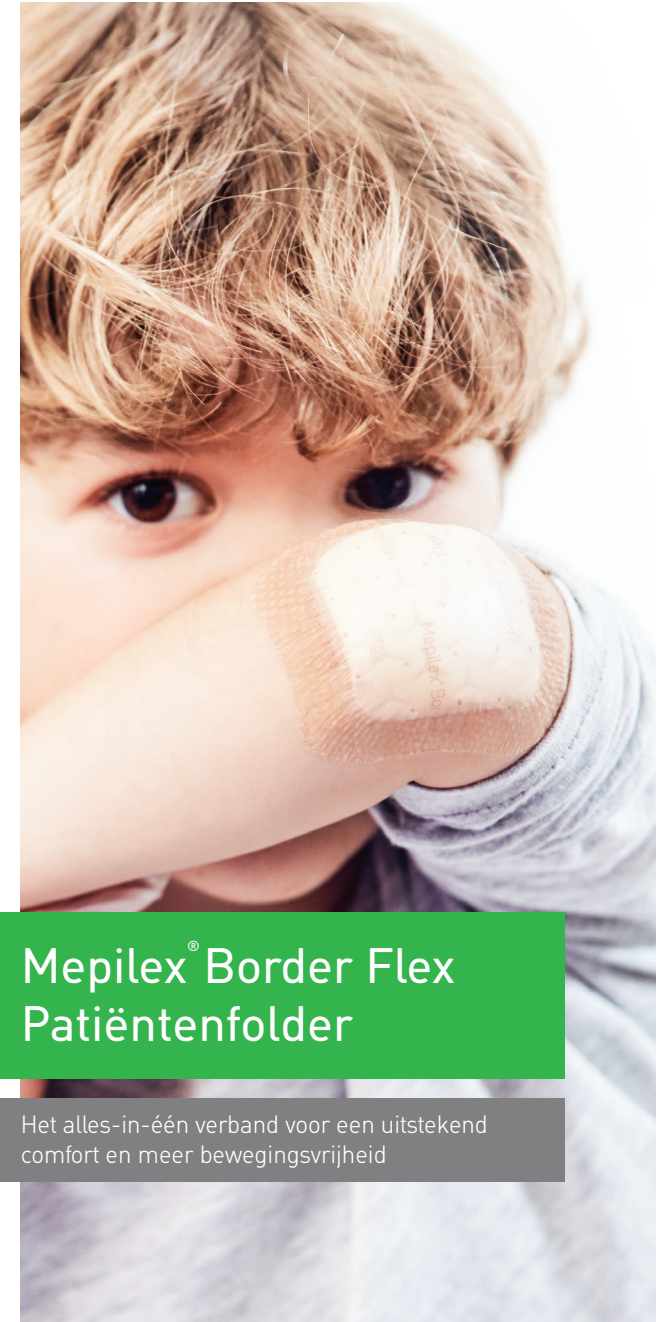

## Mepilex® Border Flex Patiëntenfolder

Het alles-in-één verband voor een uitstekend comfort en meer bewegingsvrijheid



## Voordelen van Mepilex Border Flex

- **Dankzij de zachte wondcontactlaag, wordt de beschadiging van de huid geminimaliseerd en de pijn bij het verwijderen vermindert**<sup>14,15,16</sup>
- **Heel hoog absorptievermogen** voor alle soorten exsudaat (wondvocht)<sup>4,11</sup>. Uit een test blijkt dat Mepilex Border Flex **wondvocht met bacteriën** vasthoudt in het verband en zorgt dat het niet terugkeert naar de wond.<sup>12</sup>
- **Hoge flexibiliteit van het verband biedt comfort en bewegingsvrijheid**<sup>1-3</sup>
- Bacterie- en virusbestendig (microben >25nm)<sup>6,7,8,9</sup>
- **Douchebestendig**<sup>10</sup>
- Kan worden gebruikt in combinatie met gels en zalven
- Kan worden gebruikt onder **compressie**
- **Indicaties:** voor uiteenlopende exsuderende chronische en acute wonden zoals diabetische voetulcera, veneuze beenulcera, scheurwonden en traumatische wonden.<sup>13</sup>

### Bestelinformatie

CNK-code	Artikelnr.	Afmeting	Stuks/doos (steriel)
3699-477	595200	7,5x7,5cm	5
3699-485	595300	10x10 cm	5
3699-493	595400	15x15 cm	5
3699-501	595600	15x20 cm	5

## Hoe Mepilex Border Flex aanbrengen?

### Voor het aanbrengen



Zorg ervoor dat de omliggende huid helemaal droog is alvorens het verband aan te brengen.



Kies een verband van de juiste maat door ervoor te zorgen dat het wondkussen de wond zeker 1-2 cm overlapt.



Open de steriele verpakking en haal het verband eruit.



Rek het verband niet uit tijdens het aanbrengen en vermijd rimpels.

### Het aanbrengen van het verband



Verwijder het middendeel van het schutblad (alleen bij de grotere maten is er een driedelig schutblad) en breng het verband op de juiste plaats aan.



Breng het verband aan op de wond en verwijder de andere schutbladen/het schutblad.



Strijk tenslotte het hele verband vlak om het maximaal te doen kleven en rimpels te voorkomen.

### Na het aanbrengen

Het verband mag nu tot 7 dagen op zijn plaats blijven. Inspecteer het verband en de omliggende huid elke dag of volgens protocol. Laat het verband erop tenzij er klinische redenen zijn om te wisselen. De **exsudaatmonitor** maakt het mogelijk om het vocht op te volgen<sup>5</sup>, zodat overbodige verbandwissels kunnen worden vermeden.

Voorbeeld exsudaatmonitor:



Terwijl het wondvocht zich verspreidt houdt u het aantal stippen bij dat het wondvochtgehalte in het verband weergeeft. Iedereen kan de opgeslagen telling gebruiken om de evolutie op te volgen en te registreren.

### Vervang het verband:

- Als er wondvocht uit het verband of in de randen lekt.
- Als het absorberend kussen helemaal verzadigd is (3 van de 4 hoeken).
- Bij elk teken van infectie.