

Mepi™ Debripad

Een gebruiksvriendelijke pad voor veilig, snel en vrijwel pijnloos wonddebridement

Te gebruiken als handschoen of pad

Flexibel en eenvoudig in gebruik

Microvezeltechnologie voor veilige en effectieve verwijdering van fibrineus weefsel

Snel en eenvoudig debridement

Een gezond wondbed is essentieel voor genezing. Mepi™ Debripad biedt een eenvoudige manier om dode cellen en weefsel te verwijderen, zo vaak als nodig is, zodat het genezingsproces kan beginnen.

Veilig en eenvoudig in gebruik

Mepi Debripad wordt goed verdragen door patiënten en biedt een grondige, therapeutische reiniging. Het is ook eenvoudig in gebruik.

Wondzorg waarop je kan vertrouwen

Dankzij de microvezeltechnologie is Mepi Debripad zowel zacht als grondig, en daarmee een waardevolle toevoeging aan Mölnlycke's wondzorgportfolio.

Gebruiksaanwijzing Mepi™ Debripad



1. Week Mepi™ Debripad in 20 ml steriele zoutoplossing of een andere geschikte wondreinigingsoplossing. Steek de hand in de handschoenopening van de pad.



2. Reinig het wondoppervlak voorzichtig met de zachte zijde van de pad (de zijde die van de handpalm af is gericht), zonder druk uit te oefenen.



3. Reinig indien nodig de huid rondom de wonde met een andere goed bevochtigde Mepi™ Debripad.

Productbeschrijving

Mepi Debripad is een microvezelpad van polyester/polyamide, ontworpen voor snel, veilig en vrijwel pijnloos debridement van wonden. Elke pad is steriel verpakt en bedoeld voor eenmalig gebruik.

Voordelen van Mepi Debripad

- Effectief in het verwijderen van fibrineus weefsel en debris
- Bereidt de wonde en omliggende huid veilig voor op genezing
- Eenvoudig in gebruik
- Zacht en vrijwel pijnloos debridement
- Verkrijgbaar in twee maten, voor gebruik bij de meeste wonden
- Kan volledig ondergedompeld worden zonder prestatieverlies

Indicaties voor gebruik

- Diabetische ulcera
- Arteriële en veneuze ulcera
- Doorligwonden
- Postoperatieve wonden die genezen via secundaire intentie
- Traumatische of chirurgische wonden (bijv. schaafwonden, incisies, huidscheuren)
- Brandwonden en verbrandingen (derdegraads: na chirurgisch debridement)
- Chirurgische implantatie
- Niet gebruiken bij patiënten met bekende overgevoeligheid voor een van de samenstellende materialen
- Niet gebruiken bij hard necrotisch weefsel of levend/granulerend weefsel

Voorzorgsmaatregelen

- Alleen te gebruiken onder begeleiding van een zorgverlener.
- Alleen voor eenmalig gebruik; niet (gedeeltelijk) hergebruiken, omdat dit de sterilisatie en/of werking van het verband kan aantasten.
- Niet hersteriliseren.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is of als er tekenen van besmetting op de pad aanwezig zijn.
- Mepi Debripad debridement pads niet knippen.
- Mepi Debripad debridement pads niet op de wonde laten zitten.
- Mepi Debripad debridement pads mogen niet worden ingeslikt en moeten buiten bereik van kinderen en dieren worden gehouden.

Mepi™ Debripad assortiment (steriel verpakt)

	Artikel nummer	CNK code	Afmeting (cm)	RET	TRP
Mepi Debripad ovaal	300111	4953-162	11x18 cm	5	50
Mepi Debripad rond	300113	4953-170	13 cm (diameter)	5	50

Meer informatie op molnlycke.be

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, 2600 Berchem, België. Tel. +32 (0)3 286 89 50.
De handelsmerken, namen en logo's van Mölnlycke, Mepi en Mepilex zijn wereldwijd geregistreerd bij een of meer bedrijven van de Mölnlycke Health Care Group. ©2025 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden. BNWC00022507