


Mextra® Superabsorbent

UN PANSEMENT SUPER ABSORBANT AVEC UNE COUCHE SUPÉRIEURE DÉPERLANTE

Le système quadricouche unique du pansement Mextra® Superabsorbent agit selon un ordre précis pour garantir une gestion optimale de l'exsudat. Le pansement s'avère idéal parce qu'il favorise la guérison et offre de multiples avantages, à vous comme à vos patients.

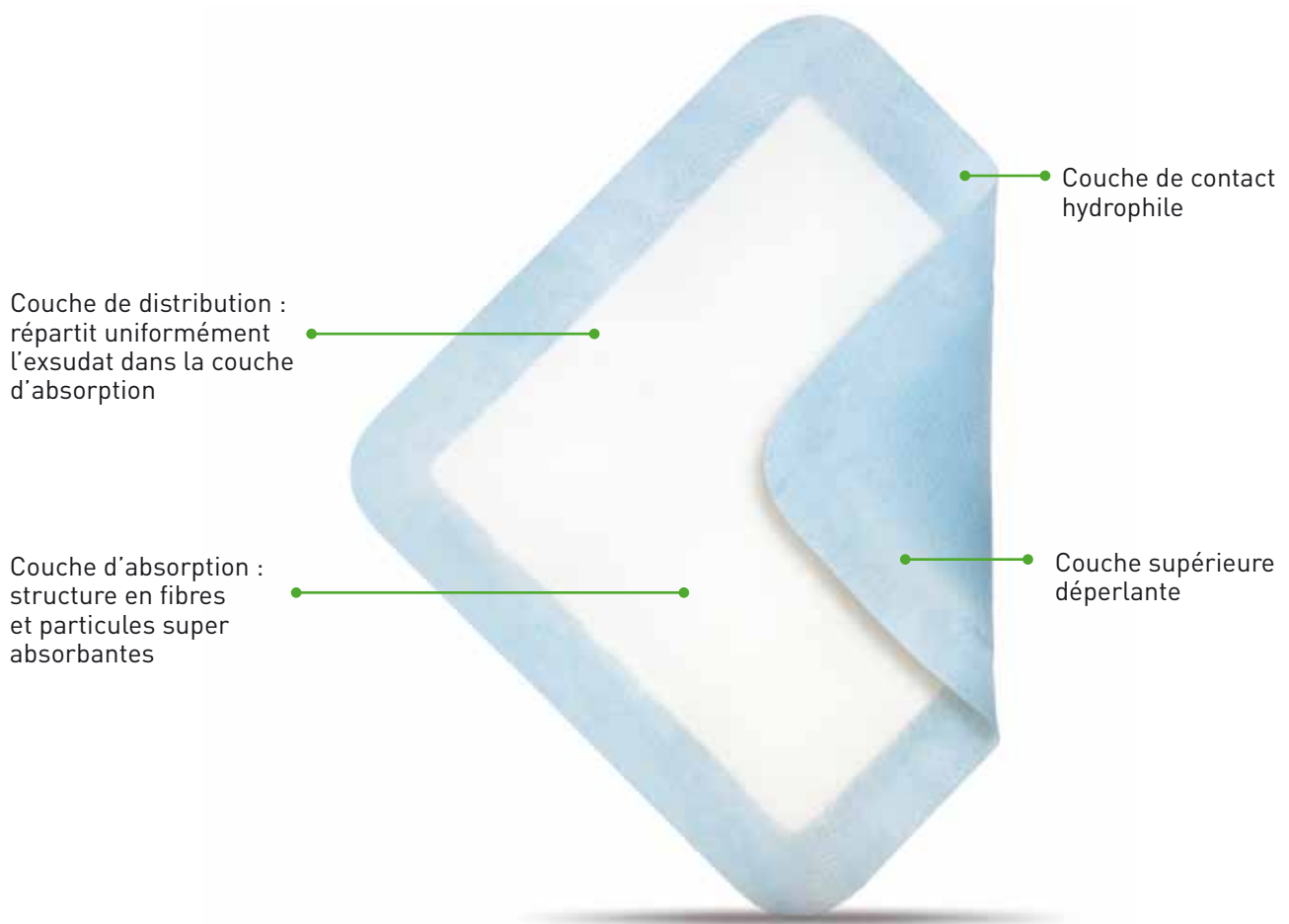


Applications

Mextra® Superabsorbent convient aux plaies modérément à fortement exsudatives. L'exsudat est absorbé par la couche de contact, puis retenu dans la couche centrale du pansement. Le risque de macération est ainsi minimisé. La couche de protection en non-tissé déperlant fait office de barrière antifluides et prévient toute fuite de l'exsudat.


Fréquence des changements de pansement

Mextra® Superabsorbent peut rester en place pendant plusieurs jours. Le pansement doit être changé en fonction de l'état clinique de la plaie ou lorsque sa capacité d'absorption est saturée.


Comment utiliser Mextra® Superabsorbent ?

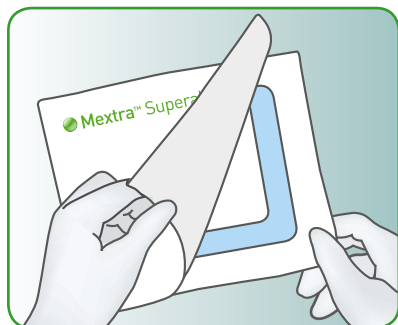

Nettoyez la plaie et sélectionnez un pansement Mextra® Superabsorbent de taille adaptée.

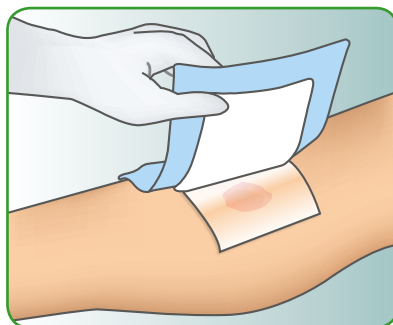

Appliquez Mextra® Superabsorbent directement sur la plaie, en veillant à orienter le côté blanc du pansement vers la plaie. Pour un résultat optimal, le coussin du pansement doit chevaucher la peau périlésionnelle sur 2 cm au minimum. Les pansements Mepitel® ou Mepitel® One peuvent être utilisés en combinaison avec Mextra® Superabsorbent.

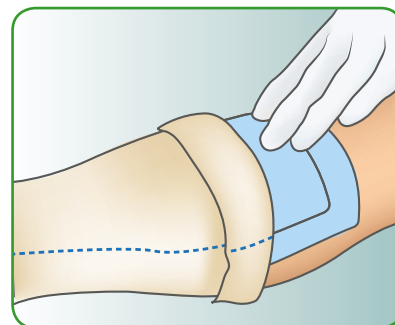


Fixez Mextra® Superabsorbent avec un pansement approprié, comme le bandage tubulaire Tubifast™ 2 Way Stretch™. Mextra® Superabsorbent peut être appliqué sous un bandage compressif.

Principaux avantages de Mextra® Superabsorbent

- Présente d'excellentes propriétés d'absorption et de rétention
- Minimise le risque de macération et de fuite
- Ne se désintègre pas et ne gonfle pas après absorption de l'exsudat
- Protège contre les fuites d'exsudat

- Maintient la couche supérieure au sec
- Garantit le confort du patient
- Peut être appliqué sous un bandage compressif
- Présente des qualités de modulation de l'activation des protéases* et favorise la guérison.

* les particules super absorbantes de la couche d'absorption modulent l'activation des protéases

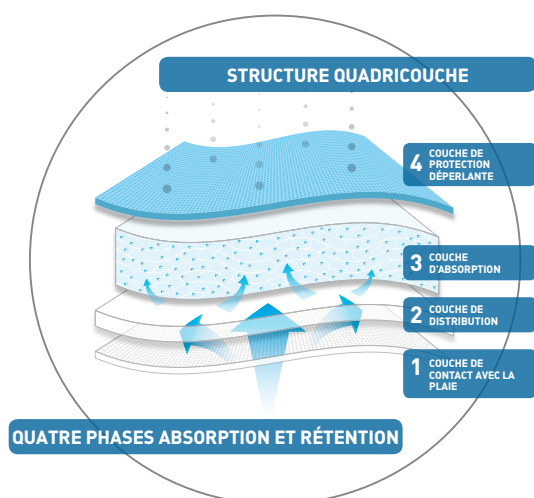

MEXTRA® SUPERABSORBENT

(distribué en emballages stériles)

N° d'article	Dim. (cm)	Pcs/boîte	Pcs/emb.de transport
610000	10 x 10	10	50
610100	10 x 15	10	40
610200	10 x 20	10	90
610300	15 x 20	10	40
610400	20 x 25	10	40
610500	20 x 30	10	50